

# INSTRUÇÕES DE USO - SUPORTE METÁLICO PARA APARELHO FIXO

Instrução de Uso: IFU-Bandas Ortodônticas MS/ANVISA nº: 80755760007

Nome Técnico ANVISA: Componentes Para Ortodontia

Fabricado por: AMERICAN ORTHODONTICS CORPORATION 3524 Washington Avenue - Sheboygan, WI 53081

Emergência 24hrs +1 920 457 5051 / Telefone para Informações +1 920 457 50 51

Importado por: AMERICAN ORTHODONTICS BRASIL P. O. LTDA Rua Carneiro da Cunha, 167 sala 60 - Jd. da Saúde -

São Paulo - Brasil - CNPJ: 11.984.167/0001-50 FONE: (11) 5072-3428 / (11) 97027-6115

Nome do Produto: Suporte Metálico para Aparelho Fixo Descrição do produto: Banda ortodôntica metálica

Número de peça do produto: REF de vários números de peças (vide etiqueta)

#### CUIDADO: A lei federal restringe este dispositivo à venda a ou por ordem do dentista/ortodontista.

O Suporte metálico Bandas Ortodônticas são anéis metálicos que se adaptam ao redor da coroa dentária, na qual se fixam tubos ortodônticos vestibulares e linguais, bem como demais acessórios que o ortodontista eleger para atingir o seu objetivo do tratamento.

# CONTRAINDICAÇÕES /

American Orthodontics vende produtos a profissionais odontólogos formados e a ortodontistas. A principal responsabilidade do profissional é identificar as possíveis contraindicações que podem impossibilitar os produtos da American Orthodontics. Também é da responsabilidade do profissional determinar quaisquer procedimentos pré-início, como também a sequência do trabalho dos aparelhos médicos/odontológicos, isto inclui qualquer procedimento de esterilização.

#### **EFEITOS COLATERAIS**

A principal responsabilidade do profissional de Odontologia e ou Ortodontista é identificar qualquer possível risco de lesão e ou contraindicações que podem surgir durante o tratamento, revezar possíveis efeitos colaterais indesejados ao paciente, e individualizar o tratamento. Durante o tratamento, os efeitos colaterais podem incluir: descolorações dos dentes, descalcificação, reabsorção radicular, complicações periodontais, reações alérgicas, dificuldades na manutenção da higiene oral, desconforto e dor.

## INDICAÇÕES DE USO

Para correções ortodônticas de má oclusões Classe I, II e III de Angle. A banda deve ser fixada na coroa dos dentes com a finalidade de receber um ou mais tubo ortodôntico, que serão soldadas a ela, seja por vestibular ou por lingual, que promoverão a movimentação dentária até a correção final da má oclusão.

### **Como Manusear**

Recomendado utilização de pinças ortodônticas de tubos, pinça Mathieu, calcador de bandas, brunidor de bandas e seu posicionamento na coroa dentária deve seguir o protocolo do profissional de Odontologia e ou Ortodontista.

#### Como Cimentar

Recomendado utilização de protocolo de colagem completo, profilaxia, condicionamento ácido e utilização de cimento ionomérico ou resina ortodôntica específica para bandagem (recomendamos a Bracepaste Band and Build).

#### Como Remover

Recomendado utilização de instrumentos ortodônticos específicos (alicate saca bandas), e descarte consciente do produto médico conforme normas sanitárias vigentes.

#### Advertências 🔔 😩



Os produtos American Orthodontics são desenhados e fabricados para uso único e, assim que removidos da boca do paciente, devem ser eliminados de forma apropriada. A American Orthodontics nega qualquer responsabilidade pela disseminação de doenças ou lesões provocadas pela reutilização dos produtos. É da principal responsabilidade do profissional de Odontologia e ou Ortodontista seguir as leis aplicáveis sobre a eliminação de aparelhos médicos ortodônticos usados.

### Responsabilidade de GARANTIA

As soluções do comprador relativamente a reclamações sobre qualquer defeito nos produtos ou serviços, devem limitar-se exclusivamente ao direito de reparação ou substituição desses produtos (com opção por parte do vendedor) ou ao reembolso do preço da compra.

#### Validade

Produto com validade desde sua fabricação de 10 anos, consulte a etiqueta do produto.

# Informações Complementares

